


GIO-350

InnoGIO

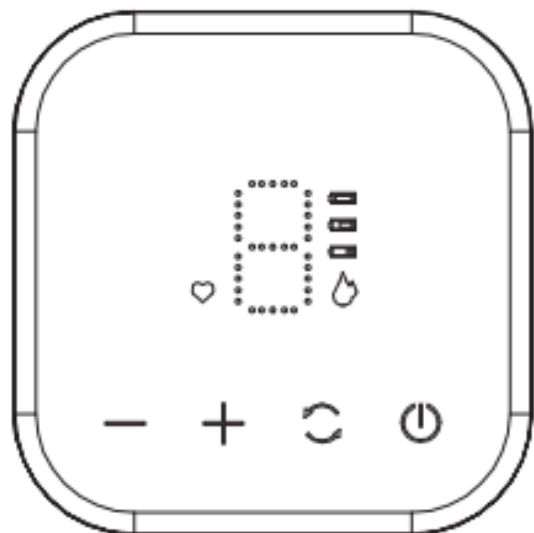

GIOmom

Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka

Děkujeme, že jste si vybrali InnoGIO výrobek.

Návod k použití

Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod a ponechte si jej pro budoucí použití.

Obrázky jsou pouze ilustrativní.

VLASTNOSTI

InnoGIO elektrická odsávačka mateřského mléka nabízí **2 režimy**: stimulační režim a sací režim napodobující sání dítěte.



pohodlné odsávání mléka



nabíjení přes USB kabel



jemné sání, možnost úpravy režimu sání



na jedno nabití vydrží v provozu po dobu 1,5h




jednoduché použití

POPIS ČÁSTÍ

Před použitím zkontrolujte součásti produktu.

Pokud některé díly chybí, kontaktujte prodejce.

Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

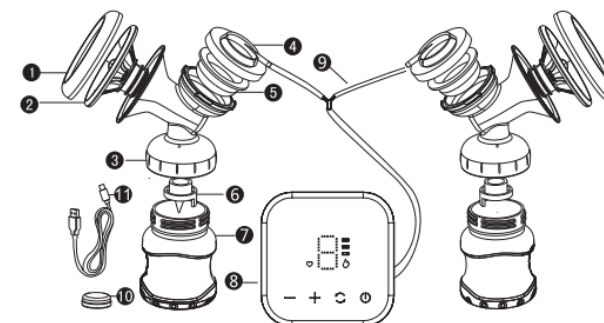

číslo	část	materiál	tepelná odolnost	počet ks
1	ochranný kryt	polypropylen	-20-120°C	2
2	masážní prsní košík	silikon	-20-200°C	4
3	hlavice odsávačky	polypropylen	-20-120°C	2
4	krytka hlavice	polypropylen	-20-120°C	2
5	membrána	silikon	-20-200°C	2
6	ventil	silikon	-20-200°C	4
7	láhev	polypropylen	-20-120°C	2
8	hlavní jednotka	ABS	-20-80°C	1
9	vzduchová hadička	silikon	-20-200°C	1
10	víčko na láhev	polypropylen	-20-120°C	2
11	USB kabel			1

SESTAVENÍ ODSÁVAČKY


(Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační, podívejte se na skutečný výrobek).

Vložte masážní prsní košík (2) do hlavice odsávačky (3). Ujistěte se, že je košík nasazený zcela přes okraj hlavice, abyste zajistili těsné přilnutí.

Pozn: V balení 2 velikosti prsních košíků.



Nejprve do hlavice odsávačky (3) nasadte membránu (5). Ujistěte se, že je membrána správně a rovnoměrně nasazena. Poté na membránu nasadte krytku (4). Jak je znázorněno na obrázku.

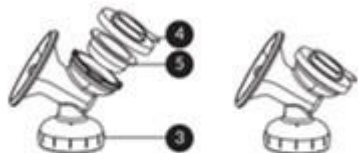


Zasuňte ventil (6) do spodní části hlavice odsávačky (3), jak je znázorněno na obrázku. Poznámka: Ventil držte opatrně, aby nedošlo k jeho poškození.

Pokud je ventil poškozený, nepoužívejte jej. Vyměňte jej za nový.

Pozn: V balení 2 náhradní ventily.




Našroubujte láhev na mléko se širokým hrdlem (7) do spodní části hlavice odsávačky (3) a nakonec připojte vzduchovou hadičku (9) k hlavní jednotce (8), jak je znázorněno na obrázku. Ujistěte se, že je hadička pevně nasazena, aby nedocházelo k úniku vzduchu.

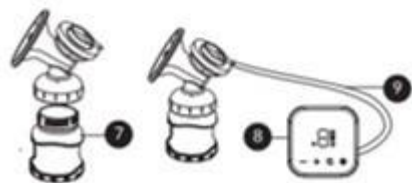

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Hlavní jednotka má celkem 4 tlačítka: **1** - tlačítko zapnutí/vypnutí, **2** - tlačítko přepnutí režimu (stimulace/sání), **3** - tlačítko zvýšení podtlaku, **4** - tlačítko snížení podtlaku.

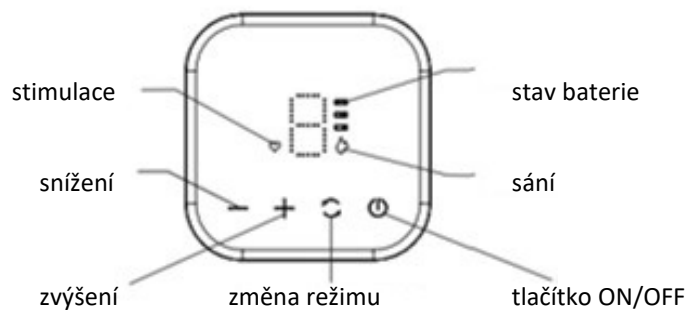

2. Před použitím si umyjte ruce a ujistěte se, že všechny části odsávačky jsou důkladně vyčištěny a správně sestaveny.

3. Posadte se do pohodlné polohy a vypodložte si nohy. Pro lepší účinek doporučujeme připravit si teplý ručník na horký obklad či masáž prsou před odsáváním.

4. Nasměrujte masážní prsní košík na bradavku a druhou rukou jej pevně přiložte k prsu, aby se dovnitř nedostal žádný vzduch.

5. Stisknutím tlačítka ON/OFF na hlavní jednotce automaticky vstoupíte do režimu stimulace. Rozsvítí se kontrolka . Stimulace probíhá proto, aby bylo používání odsávačky efektivnější a pohodlnější. Sání ve fázi stimulace je nízké, jeho účelem je masírování a stimulace prsa. Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ si zvolíte vhodnou úroveň stimulace. Stimulační režim má celkem 5 úrovní.

6. Stisknutím tlačítka přepnete na režim sání. Rozsvítí se kontrolka . Přístroj přejde do normálního režimu odsávání prsu. V tomto režimu je k dispozici 9 úrovní síly sání. Během používání můžete stisknutím tlačítek „+“ a „-“ vybrat požadovanou intenzitu sání.

- Jak zjistit nejvyšší sací sílu, která je pro vás nejvhodnější?

Postupně zvyšujte úroveň sání. Ve chvíli, kdy se začnete cítit již lehce nepohodlně, přestaňte a poté úroveň sání mírně snižte.

- Doporučujeme použít funkci "sání" ihned po režimu "stimulace".
- Odsávačka mateřského mléka se po 30 minutách automaticky vypne.

UPOZORNĚNÍ

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod.
- Odsávačku nikdy nevkládějte do vody nebo sterilizátoru za účelem mytí nebo dezinfekce.
- Spojovací hadičku lze používat bez dezinfekce. Dávejte pozor, abyste hadičku během používání nezkroutili nebo neskřípli.
- Z bezpečnostních důvodů uchovávejte výrobek mimo dosah kojenců a dětí.
- Obal není hračka, uchovávejte jej mimo dosahu kojenců a dětí.
- Výrobek nepoužívejte v posteli, dětské postýlce, kolébce, hracích centrech. Výrobek není hračka.
- V případě použití tohoto výrobku v období snížené laktace nebo jejích poruch se řiďte doporučeními lékařů nebo zdravotních sester či porodních asistentek. Použití tohoto přípravku by mělo být pozastaveno do doby, než takové doporučení získáte. Tento výrobek nemá status zdravotnického prostředku a není k tomuto účelu určen. Výrobek by proto neměl být používán k lékařským účelům, zejména k léčbě nebo zmírnění onemocnění nebo k nahrazení fyziologického nebo chorobného procesu či stavu.
- Hlavní jednotku tohoto výrobku sami nerozebírejte, a to ani v případě, že je poškozená. S opravou se obraťte na prodejce nebo distributora.
- Tento výrobek je určen pouze pro použití jedním uživatelem a neměl by být sdílen mezi uživateli. Z hygienických a zdravotních důvodů jej nepoužívejte spolu s více osobami.

UPOZORNĚNÍ

- Demontujte veškeré příslušenství, které přichází do styku s prsy nebo mateřským mlékem, jako jsou láhve, dudlíky, hlavice, prsní nástavce.
- Výše uvedené příslušenství ihned po použití umyjte, abyste zabránili zaschnutí zbytků mléka a vzniku bakterií. Po umytí je uchovávejte na chladném a dobře větraném místě.
- Při montáži dbejte na to, aby byly jednotlivé součásti sestaveny ve správném pořadí.

MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

- **Problém:** Přístroj nefunguje
Řešení: Zkontrolujte napájení, zkontrolujte, zda je adaptér správně zasunutý. Napájecí kabel vyměňte.
- **Problém:** Nedostatečné sání
Řešení:
 1. Ověřte, zda je ventil správně nainstalován. Pokud byla instalace správná a sání zůstává nedostatečné, vložte ventil na 3 minuty do vroucí vody a po vysušení jej znovu nasadte; správné sání by se mělo obnovit.
 2. Napájení z baterie je nedostatečné. Přístroj pomocí USB kabelu nabijte.
 3. Zkontrolujte, zda je prsní košík dobře připevněn k prsu a zda nedochází k úniku vzduchu.
 4. Je-li teplota v místnosti nižší než 15°C, nechte odsávačku 30 sekund v provozu, dříve než začnete s odsáváním.

LIKVIDACE

Likvidace nepotřebného vybavení domácími uživateli v EU:



Přítomnost tohoto symbolu na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek nelze likvidovat stejným způsobem jako běžný, domácí odpad. V důsledku toho jste zodpovědní za správnou likvidaci zařízení a jste zodpovědní za jeho odevzdání na autorizovaném sběrném místě pro recyklaci nepotřebných elektronických a elektrických zařízení. Třídění, likvidace a recyklace použitého zařízení pomůže chránit přírodní zdroje a zajistí, že recyklace bude probíhat v

souladu se zásadami ohleduplnosti k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Další informace o sběrných místech pro použitá zařízení získáte u místní služby pro likvidaci domovního odpadu nebo na místních úřadech.

Napájení: DC 5V 2A

Kapacita baterie: 1500mAh

innogIO

Importer: **INNOGIO** sp. z o.o.
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland
www.innogio.com



@innogIO.official



@innogio_com



Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz