



Rinö Pro

Nosní aspirátor bez filtru

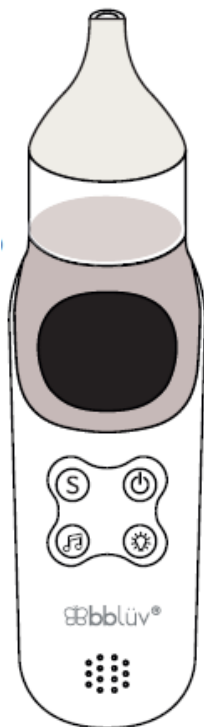

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.cz

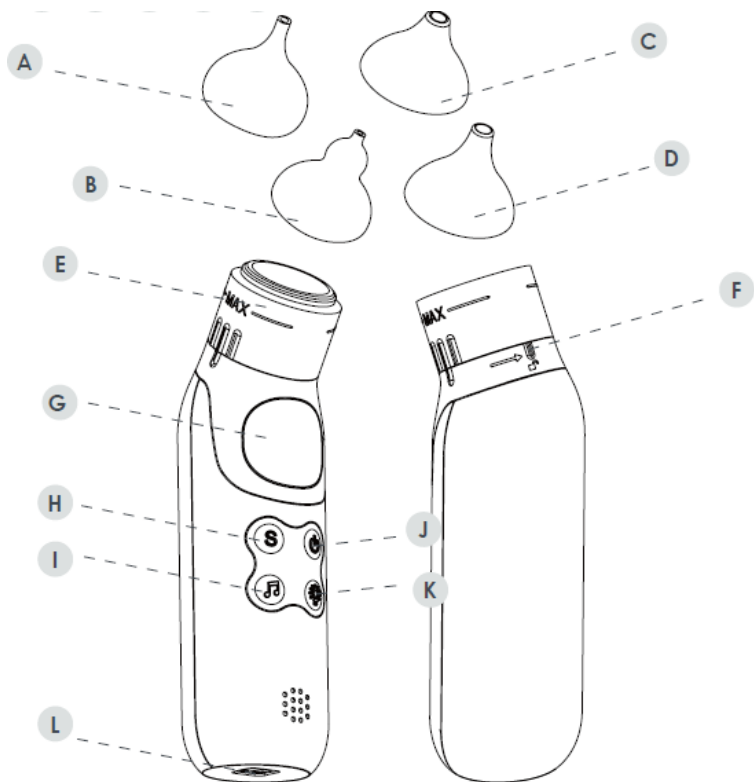

- A Prodloužená špička pro děti od 2 let
- B Kuželová špička pro děti ve věku 0–2 roky
- C Široká špička pro děti ve věku 0–2 roky
- D Široká špička pro děti od 2 let
- E Nádoba na hleny
- F Zámek/odemykání nádrže
- G LED displej
- H Regulátor úrovně sání
- I Tlačítko hudby
- J Tlačítko spuštění/zastavení
- K Tlačítko světla
- L Nabíjecí port typu C


POUŽITÉ NORMY:

Na konstrukci a výrobu zařízení se vztahují následující normy:

- IEC/EN 60601-1 Elektrická zdravotnická zařízení – Část 1: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytné vlastnosti
- IEC/EN 60601-1-2 Elektrická zdravotnická zařízení – Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytné vlastnosti – Doplnková norma: Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky a zkoušky
- IEC/EN 60601-1-6 Elektrická zdravotnická zařízení – Část 1-6: Obecné požadavky na bezpečnost – Doplnková norma: Použitelnost
- IEC/EN 60601-1-11 Elektrická zdravotnická zařízení – Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytný výkon – Doplnková norma: Požadavky na elektrická zdravotnická zařízení a elektrické zdravotnické systémy používané v domácím zdravotnickém prostředí
- EN ISO 10993-5 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 5: Zkoušky cytotoxicity in vitro
- EN ISO 10993-10 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 10: Zkoušky senzibilizace kůže
- EN ISO 10993-23 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 23: Zkoušky dráždivosti


PŘED POUŽITÍM

1. Nabijte baterii Rinö Pro po dobu dvou hodin. Po dokončení nabíjení se na displeji baterie zobrazí všechny tři pruhy.

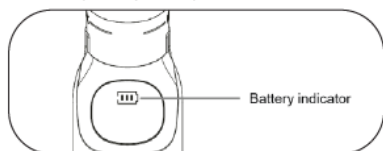


Poznámka: Z bezpečnostních důvodů nelze Rinö Pro během nabíjení používat. Aby nedošlo k poškození baterie v důsledku dlouhodobého nízkého napětí, nabíjejte zařízení každé tři měsíce.

2. Rozložte nádobku na hlen a nosní koncovky, vyčistěte a osušte jejich části.

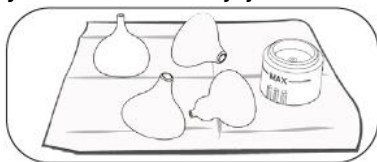

3. Nasadte nádobku na hlen. K montáži používejte pouze čisté a suché části. Nasadte silikonovou koncovku. Vyberte velikost, která nejlépe vyhovuje nosu vašeho dítěte.

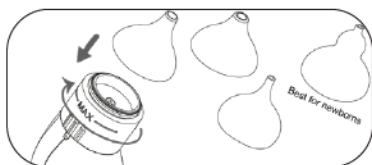


JAK POUŽÍVAT RINÖ

1. Stiskněte tlačítko zapnutí na 2 sekundy, aby se Rinö Pro zapnulo.

2. Stiskněte tlačítko pro nastavení sání a vyberte vhodnou sílu sání.

TIP: Pokud je hlen řídký, můžete Rinö Pro použít na nižším nastavení. Pokud je hlen hustý, můžete použít Rinö Pro na vyšším nastavení, než je obvyklé.

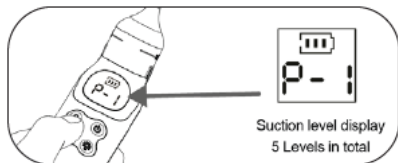


POZNÁMKA: V případě oteké nosní sliznice nebo ucpaných nosních otvorů použijte 30 minut před aplikací decongestantní roztoky nebo nosní spreje.


3. Posadte dítě na klín, držte ho v náručí nebo mu podepřete záda polštářem. Můžete ho také posadit do dětské sedačky. Aby nedošlo k poranění, nekládejte špičku příliš hluboko, netlačte na stěnu nosní dírky a nezablokujte nosní díрку úplně. Pro dosažení nejlepších výsledků by špička měla směřovat k vnější straně nosní dírky v úhlu 90 stupňů.



4. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, abyste pozastavili provoz. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 2 sekundy, abyste přístroj Rinö Pro vypnuli. Přístroj Rinö Pro se automaticky vypne po 5 minutách, pokud nedojde k žádné interakci uživatele.

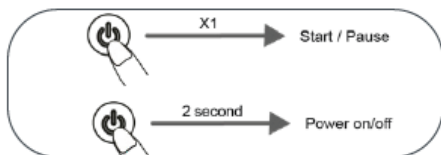

5. Sledujte, jak se nádoba na hlen plní nečistotami. Nepřekračujte maximální hladinu v nádobě na hleny.

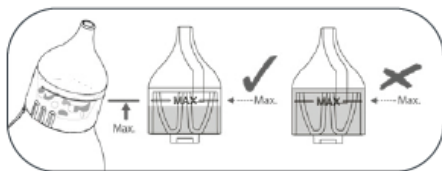


Poznámka: Nenechte nosní sekrety překročit značku MAX na nádobě na hleny.

Pokud chcete dítě rozptýlit, použijte po zapnutí napájení následující funkci.

Tlačítko světla


1x zapnutí/vypnutí světla

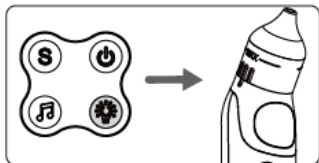

Tlačítko hudby

1x zapnutí hudby



Dlouhým
stisknutím po
dobu 2 sekund
změníte hudbu.

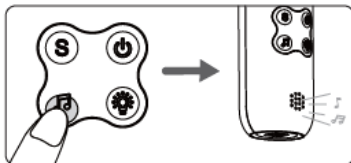

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Z hygienických důvodů je důležité Rinö Pro před a po každém použití umýt. Pečlivě dodržujte pokyny.

1. Otočením uzamkněte/odemkněte nádobku na hleny.
2. Jemně stáhněte špičku.
3. Opláchněte/umyjte nádobku na hleny a koncovky. Teplota vody nesmí překročit 100 °C ani teplotu páry.
4. Motorovou jednotku očistěte vlhkým hadříkem a osušte čistým suchým ručníkem. Dbejte na to, aby se do vnitřku nosního aspirátoru nedostala žádná tekutina.

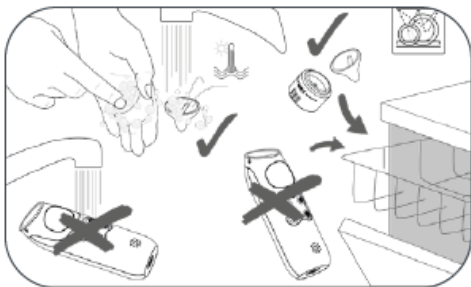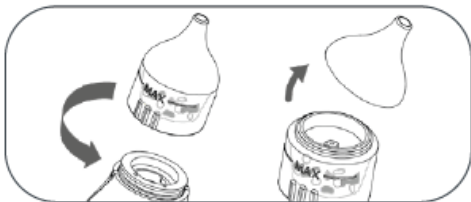

URČENÉ POUŽITÍ

Rinö poskytuje přerušované odsávání pro odstranění nosních sekretů a hlenu, aby zmírnil nepříjemné pocity v nose.

UPOZORNĚNÍ

- Přístroj Rinö Pro by měl vždy používat dospělý.
- Přístroj Rinö Pro je určen výhradně k čištění/odsávání nosních sekretů. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k použití, například v ústech nebo uších.
- V případě infekce, horečky, podráždění nosu nebo krvácení okamžitě přestaňte přístroj používat a poraďte se se svým lékařem.

- Nepoužívejte Rinö Pro, pokud má vaše dítě na nose známky poranění, řezné rány, podráždění nebo zánět.
- Kontraindikace: hemofilie, rozšířené cévy sliznice nosní přepážky, časté krvácení z nosu, léčba antikoagulancii, vrozené vady (např. rozštěp patra).
- Rinö Pro je určen pro osobní, nikoli komerční použití.
- Rinö Pro obsahuje elektrické součásti, které je třeba při čištění chránit.

Dodržujte pokyny pro čištění uvedené v části Čištění a údržba tohoto návodu.

- Uchovávejte mimo dosah dětí do 12 let.
- Nevystavujte Rinö Pro přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte jiné špičky než ty, které jsou dodány s tímto zařízením.
- Neupravujte Rinö Pro bez souhlasu výrobce.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a sledováno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rozhlasová a televizní zařízení.

Technické parametry

Displej: LED obrazovka

Sací síla: -55 až -75 kPa

Hmotnost: 150 g (s nástavcem) (5,3 oz)

Rozměry: 168 × 47 × 54 mm (6,6 × 1,85 × 2 in)

Úroveň voděodolnosti: IP22

Zdroj napájení: 3,7 V 450 mAh Li-ion baterie

Zdroj nabíjení: Vstup DC 5V/1A

Ochrana proti elektrickému šoku: Typ BF

Režim provozu: Nepřetržitý provoz

Očekávaná životnost zařízení (elektrické části): 3 roky

Výdrž baterie: 50 minut

Provozní podmínky

Teplota: +10 °C až +40 °C

Vlhkost: 15 % až 95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace

Atmosférický tlak: 70 kPa až 106 kPa

Podmínky pro skladování a přepravu

Teplota: -20 °C až +55 °C

Vlhkost: ≤95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace

Atmosférický tlak: 70 kPa až 106 kPa