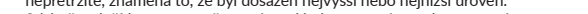


Podržte tlačítko  po dobu 1,5 sekundy, abyste zapnuli odsávačku (automaticky se aktivuje režim masáže). Stiskněte tlačítko znovu pro zastavení odsávání. Stiskněte tlačítko  pro změnu režimu (masáž/odsávání/imitace sání) Režim masáže  (celkem 10 úrovní) Režim odsávání  (celkem 10 úrovní) Režim imitace sání  (celkem 10 úrovní) Podržte tlačítko pro změnu režimu  pro aktivaci režimu střídání (režim masáže a odsávání, režim masáže a imitace sání) Stiskněte tlačítka  nebo  pro přizpůsobení síly sání. Pokud číslo bliká nepřetržitě, znamená to, že byl dosažen nejvyšší nebo nejnižší úroveň. Stiskněte tlačítko  pro přepnutí mezi jednostranným a oboustranným odsáváním Odsávání z levé prsa: zobrazuje se písmeno „L“ Odsávání z pravé prsa: zobrazuje se písmeno „R“ Odsávání z obou prsou: zobrazuje se písmena „L“ a „R“

▲ Výchozí čas chodu odsávačky je 30 minut. Poté se zařízení automaticky vypne (před vypnutím si zapamatuje úroveň režimu odsávání).

▲ Mléko v lahvi by nemělo dosahovat k ventilu, aby nevyteklo.

Používanie odsávačky mlieka:

Dôkladne si umyte ruky a uistite sa, že vaše prsia sú čisté. Sadnite si v pohodlnej polohe na pohodlnú stoličku alebo kreslo (môžete použiť vankúše na podporu chrbta). Uistite sa, že máte po ruke pohár vody. Priložte odsávačku k prsníku. Uistite sa, že vaša bradavka je v strede masážnych podložiek, ktoré pevne priliehajú. Stlačte tlačidlo napájania. Odsávačka automaticky aktivuje režim masáže – môžete nastaviť silu masáže pomocou tlačidiel + a -. Keď mlieko začne prúdiť, môžete meniť režimy pomocou tlačidla a vybrať si ten, ktorý je pre vás najpohodlnejší. Poznámka: Nemusíte vyberať najvyššiu úroveň. Zvoľte tú, ktorá je pre vás najpohodlnejšia. Po skončení odsávania mlieka vypnite odsávačku a opatrne ju odstráňte z prsníka. Odskrutkujte fľašu od odsávačky – môžete ju použiť na kŕmenie dieťaťa alebo ju uložiť na neskôr. Vyčistíte zvyšné časti odsávačky podľa pokynov v sekcii 10 „Čistenie a dezinfekcia“. Odpojte motor od elektrickej siete.

Vstupní napětí: 100-240 V – 50/60 Hz
Výstupní napětí: 5 V 1000 mA
Jmenovité napětí: 5 V
Jmenovitý výkon: 5 W
Lithium-iontová baterie: 3.7 V 1800 mAh
Životnost zařízení: 1,5 roku
Výchozí doba činnosti: 30 minut
Sací síla: 60 mmHg – 280 mmHg
Úroveň hluku: <50 dB
Kód IP: IP22
Příslušné podmínky pro používání: 10–30°C, RH 15%–93%, 700–1060 hPa
Příslušné podmínky pro skladování: -25–50°C, RH 15%–93%, 700–1060 hPa
Standard provedení: GB4706.1-2005

Recyklace

Do běžného odpadu – odevzdejte je do oficiální sběrný. Nevkládejte zařízení do běžného odpadu. Seznamte se s místními předpisy o likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zařízení likvidujete správným způsobem, přispíváte k prevenci rizik pro životní prostředí a lidské zdraví.

Kontraindikace a upozornění

⚠ Upozornění:

• Produkt je určen k použití pouze jednou osobou. Používání zařízení více osobami může ohrozit zdraví a zneplatnit záruku. • Pokud jsou vnější části napájecího kabelu uvolněné nebo odpadnou, přestaňte zařízení používat a okamžitě kontaktujte výrobce. Poškození izolačního obalu kabelu může vést k úrazu elektrickým proudem. • Pokud je odsávání nepohodlné nebo bolestivé, vypněte zařízení, prstem oddělte prso a nástavec a sundejte nástavec. • Odsávání může vyvolat porod. Nepoužívejte zařízení před porodem. Pokud během kojení nebo odsávání otěhotníte, kontaktujte svého lékaře, než začnete znovu používat odsávačku.

• Pokud jste infikována virem hepatitidy B nebo C, nebo virem HIV, použití odsávačky mléka neomezí ani neeliminuje riziko přenosu viru na dítě prostřednictvím mateřského mléka. • Nezahřívajte mléko v mikrovlnné troubě a nevařte ho. Pokud zahřívate mléko v mikrovlnné troubě, mohou se v něm vytvořit zvlášť horké části, které způsobí vážné popáleniny na ústech dítěte. (Zahřívání v mikrovlnné troubě může také změnit složení mléka).

Opatření:

• Vždy odpojte zařízení od elektrické sítě ihned po použití, pokud ho nevybíjíte. • Nenechávejte zařízení na místě, odkud by mohlo spadnout nebo spadnout do dřezu nebo umyvadla. • Odsávačka mléka a její příslušenství nejsou odolné vůči teple – vždy je uchovávejte mimo teplé povrchy a oheň. • Nepoužívejte odsávačku mléka v blízkosti hořlavých materiálů. • Nikdy nenechávejte připojenou odsávačku mléka k napájení bez dozoru. • Nikdy nepoužívejte elektrické zařízení, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, zařízení nefunguje správně, nebo bylo upuštěno či poškozeno. Pokud zjistíte, že zařízení je poškozené, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis na čísle +48 508 311 775. • Nepoužívejte elektrické zařízení, které bylo vystaveno působení vody nebo jiné tekutiny, včetně:

Nepoužívejte zařízení při koupání ve vaně nebo pod sprchou. Nikdy nevkládejte zařízení do vody nebo jiné tekutiny. Nepolejte odsávačku mléka vodou. Pokud bylo zařízení vystaveno vodě nebo jiné tekutině, nedotýkejte se ho. Odpojte ho od elektrické sítě, vypněte a kontaktujte výrobce. • Takové zařízení není opravitelné. Nepokoušejte se ho opravit sami. Neměňte zařízení. • Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení. Vyměňte poškozené nebo opotřebované části. • Používejte pouze napájecí adaptér, který byl přiložen k odsávačce. • Používejte odsávačku pouze v souladu s účelem uvedeným v návodu. • Nepoužívejte odsávačku, když spíte nebo jste velmi unaveni. • Před každým použitím zkontrolujte všechny části, které budete používat. • Pokud se v hadičce objeví plíseň, přestaňte používat odsávačku a vyměňte hadičku za novou. • Před prvním použitím umyjte a dezinfikujte všechny části, které přijdou do kontaktu s prsy a mlékem. • Po každém použití umyjte všechny části, které přijdou do kontaktu s prsy a mlékem. • Při používání odsávačky nebo jejího příslušenství buďte zvlášť opatrní, pokud jsou v blízkosti dětí.

Děkujeme, že jste si vybrali produkty InnoGIO!

Aby bylo správné používání produktu, pečlivě si přečtěte návod k obsluze a uchovejte ho pro případ, že budete mít v budoucnu jakékoliv dotazy.

Ilustrace uvedené v návodu mají pouze informativní charakter. Pokud dojde k jakýmkoliv nesrovnalostem mezi obrázky a produktem, řiďte se skutečným produktem.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů nás prosím kontaktujte na e-mailu: innogio@innogio.com

GIO-350PRO



innoGIO

GIOmomPRO

Dvojnásobná elektrická odsávačka

NÁVOD K POUŽITÍ

Verze manuálu: V1.0.

Datum vydání: 2023/06

Úvod01


Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Váš nový odsávač je kompaktní a diskrétní – můžete si ho vzít kamkoli, abyste pohodlně odsávala mléko a podpořila jeho produkci. Tato příručka obsahuje různé bezpečnostní pokyny a návod na použití dvojitého elektrického odsávače. Před použitím si pečlivě přečtěte návod a uchovejte ho pro případné dotazy v budoucnu, umístěte ho na vhodné místo.

Tento odsávač byl navržen tak, aby vám umožnil odsávat mléko v pohodlnější poloze. Jemná ochranná podložka masážní hlavice poskytuje pocit měkkosti a tepla a simuluje sání prsu dítětem, díky čemuž mléko teče tiše, pohodlně, jemně a rychle. Odsávač je kompaktní, inteligentní a snadno se sestavuje. Všechny části jsou vyrobeny z materiálů, které neobsahují BPA a lze je mýt v myčce.

Tento odsávač vám může pomoci prodloužit dobu kojení. Díky němu můžete odsát a uchovávat mléko. Když nemůžete nakrmit dítě přímou prsem, dítě může pít mléko odsáté odsávačem. Díky malému a promyšlenému designu je odsávač velmi pohodlný na použití. Můžete ho nosit s sebou a odsávat mléko v čase, který vám vyhovuje, a tím zajistit výživu pro své dítě.


Schéma zařízení

Následující ilustrace vysvětluje symboly, které se zobrazují na displeji:

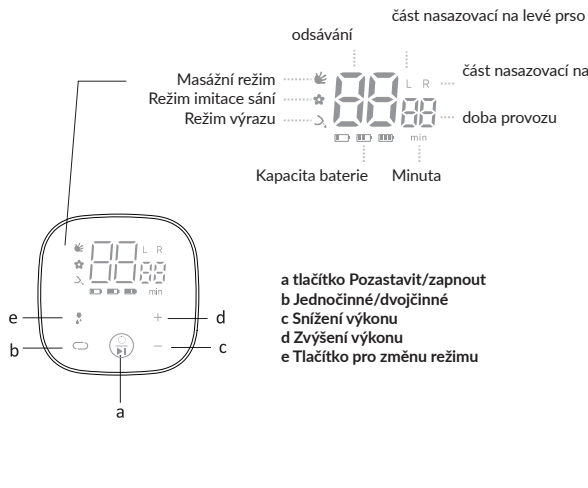

Popis02

1. Viko*
 2. Masážní polštář*
 3. Překryvná vrstva*
 4. Pouzdro odsávačky mateřského mléka*
 5. Silikonová membrána*
 6. Membránový kryt*
 7. Trubka
 8. Ventil*
 9. Kojenecká láhev*
 10. Uzávěr láhve s výlevkou*
 11. USB kabel
 12. Motor
- Poznámka: Sada obsahuje 2 díly označené hvězdičkou.

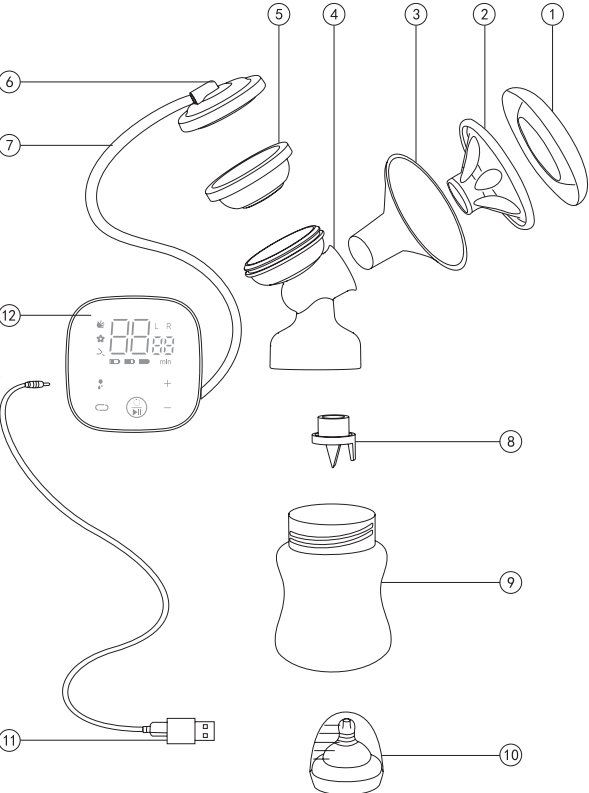



Příprava k použití a montáž03

Všechny části je nutné umýt po každém použití a dezinfikovat před každým použitím, jak je popsáno v části 10 „Čištění a dezinfekce“.

Sestavení odsávačky

Upozornění: Nejdříve se ujistěte, že jste všechny části (kromě motoru) umyla a dezinfikovala. Před zahájením montáže čistých částí si důkladně umyjte ruce. Buďte opatrní! Umyté části mohou být stále horké.

Seznamte se s níže uvedeným schématem:

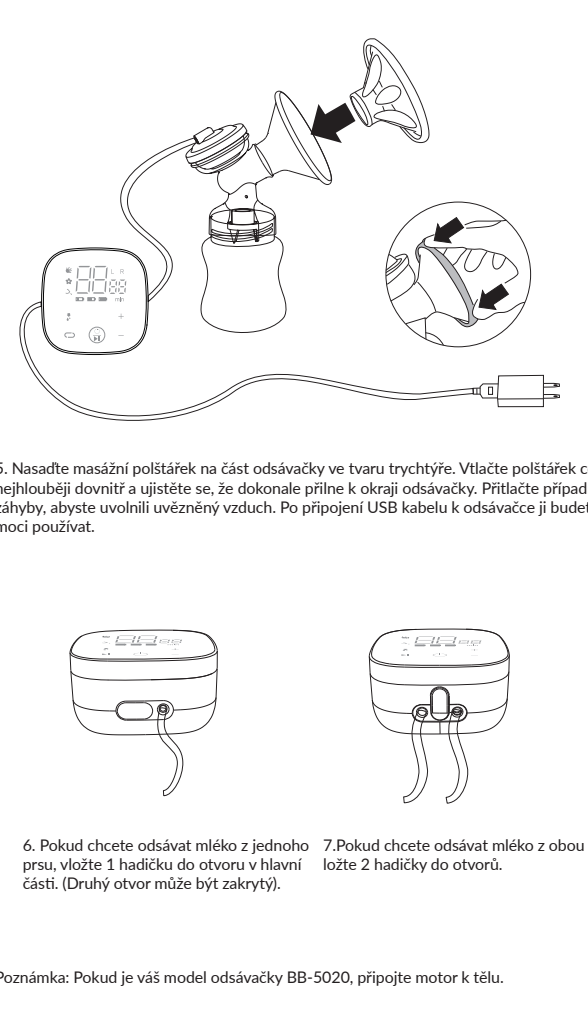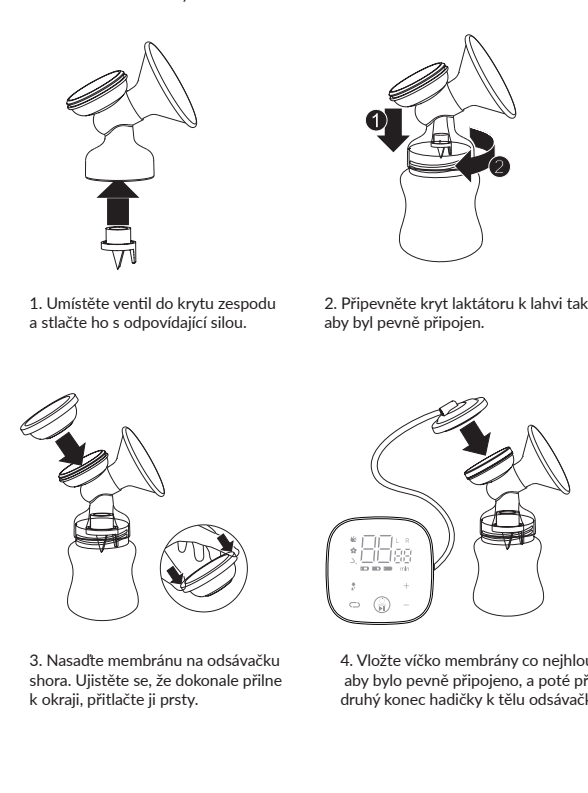

Použití baterií05

STAN BATERII	
	Plně nabití baterie stačí na 2,5 hodiny provozu odsávačky (61–100%)
	Baterie z poloviny nabitá (31–60 %)
	Slabá baterie (5–30 %)
	Přistání
Pozor! Nenabíjejte odsávačku mléka déle než 24 hodin, aby nedošlo k poškození baterie.	

Řešení problémů

Nedostatek sání
Zkontrolujte, zda byly všechny části správně sestaveny a zda není ventil poškozený (Poznámka: nikdy ho nečistěte drhnutím). Ujistěte se, že membrána a masážní polštářek dokonale přiléhají k tělu odsávačky.

Nemohu odsát mléko
Ujistěte se, že síla sání je dostatečná a že odsávačka byla správně sestavena. Uvolněte se a zkuste to znovu, po několika pokusech byste měli být schopni mléko odsát. Dávejte pozor na známky správného sání.

Bolest během používání odsávačky
Je možné, že síla sání je příliš velká. Není nutné používat maximální sílu. Zapněte masážní režim, abyste stimulovali prsa, a poté přepněte na režim odsávání. Můžete také kontaktovat lékaře nebo laktiční poradkyni.

Problém se zapínáním
Zkontrolujte, zda je kabel připojen k napájecímu zdroji s výkonem 5V a intenzitou 1A, připojte odsávačku k USB kabelu počítače nebo zkontrolujte funkčnost originální nabíječky vašeho telefonu. Pokud je zařízení vybití, nabijte ho před použitím.

Mléko se vylévá
Pokud dojde k nehodě, například pokud uvidíte mléko nebo vodu na membráně nebo v hadičce, vypněte zařízení, umyjte ho a nechte oschnout. Pokud je membrána poškozená, je třeba ji vyměnit.

Používání odsávačky06

Kdy odsávat mléko

Pokud vám lékař nebo laktiční poradce neřekne jinak, měli byste začít používat odsávačku, když bude množství mléka a harmonogram kojení stabilní (obvykle 2–4 týdnů po porodu).

Výjimky:

Odsáváte mléko, které má být podáno dítěti v nemocnici. Máte otoky prsou (bolí vás, jsou zduřelé): v tomto případě můžete odsát malé množství mléka před kojením nebo po něm, abyste ulevili od bolesti a pomohli dítěti při sání. Máte bolavé nebo prasklé bradavky: můžete počkat s odsáváním mléka, dokud se nezahojí. Pokud nemáte kontakt s dítětem a chcete ho kojít, až budete opět spolu, měla byste pravidelně odsávat mléko, aby laktace neustala.

Jak účinně odsávat mléko

Vyberte si vhodný čas dne, například ráno, kdy máte hodně mléka, před prvním odsáváním nebo po něm. Odsávejte mléko, pokud dítě nepije přímo. Pracující matky mohou odsávat mléko, když si během pracovního dne odpočinou. Používání odsávačky vyžaduje praxi – možná budete muset několikrát zkusit, než se vám to podaří. Naštěstí je odsávačka snadná na sestavení a použití, takže se rychle naučíte, jak obrátně odsávat mléko.

Je dobré se seznámit s odsávačkou a naučit se, jak ji používat, než začnete mléko poprvé odsávat. Vyberte si čas, kdy se nebudete muset spěchat a nikdo vám nebude překážet. Pohled na dítě může pomoci vyvolat reflex vypuzení mléka. Pomoci může také teplo. Zkuste odsávat mléko po koupeli nebo sprše, nebo si na několik minut položte na prsa ohřátý hadřík, než začnete odsávat mléko. Možná bude pro vás snazší odsávat mléko, když dítě bude sát druhé prso nebo těsně po kojení.

Přerušte odsávání, pokud to způsobuje bolest, a obraťte se na laktiční poradkyni nebo lékaře.